


Gebruiksaanwijzing

RAVE SAFE

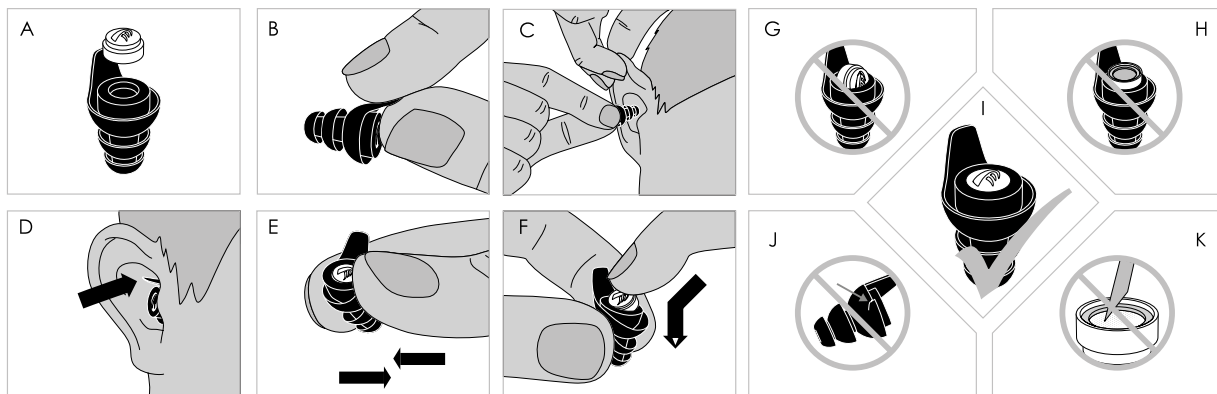

De gehoorbescherming bestaat uit twee onderdelen; een pilvormig (geluids)filter en een universeel herbruikbaar oordopje (Afbeelding A).

De filters zijn standaard geplaatst in de grootste (8-12mm) oordopjes. Probeer eerst dit formaat oordopje, volgens onderstaande instructies, in het oorkanaal te plaatsen. Indien het grote oordopje moeilijk in te brengen is of oncomfortabel aanvoelt, dan kunt u het kleinere (6-11mm) oordopje proberen. Vergeet niet om de filters over te zetten en correct te plaatsen (zie "Wisselen formaat oordopje"). Om de gecertificeerde demping te bereiken is het belangrijk dat er een goede afsluiting is tussen het oordopje en het oorkanaal.

Inbrengen oordopjes

Om het risico op infecties te verminderen is het belangrijk dat zoveel de handen als de oordopjes schoon zijn voordat u deze inbrengt.

Pak het lipje van het oordopje tussen duim en wijsvinger (Afbeelding B). Om het inbrengen te vergemakkelijken trekt u met uw andere hand de bovenkant van uw oor naar buiten en omhoog (Afbeelding C). Duw en draai het oordopje voorzichtig in het oor totdat deze comfortabel in het oor zit en een goede afsluiting vormt met het oorkanaal. Positioneer het lipje aan de bovenkant van het oor, zodat het lipje makkelijker is te vinden en vast te pakken bij het verwijderen van het oordopje (Afbeelding D).

Verwijderen uit het oor

Voor u de oordopjes uit het oor haalt is het aan te raden eerst met een voorzichtige draaiende beweging de afsluiting met het oorkanaal te verbreken. Dit helpt een onaangename druk op het trommelvlies te voorkomen. Berg de gehoorbescherming, na reiniging, op in een schoon bewaarsysteem.

Wisselen formaat oordopje

Om van oordopje te wisselen dient u eerst het filter (Afbeelding A) uit het huidige oordopje te verwijderen.

Voor verwijderen filter;

- Knijp voorzichtig in het oordopje net onder het filter tot deze uit het oordopje 'plopt' (Afbeelding E).

Voor aanbrengen filter;

- Zorg ervoor dat het logo op het filter naar boven gericht is, zodat deze zichtbaar blijft na plaatsing in het oordopje.
- Plaats het filter in de grootste opening van het oordopje. De beste manier is om het filter onder een hoek in de holte te duwen en zo eerst de onderkant van het filter in het oordopje te plaatsen. Duw vervolgens op de bovenkant van het filter om deze correct in de

holte van het oordopje te positioneren (Afbeelding F).

Om de gecertificeerde demping te bereiken dient het filter correct te zijn geplaatst.

Reinigen gehoorbescherming

Reinig het oordopje na ieder gebruik om oorsmeer (cerumen) en eventueel andere vuil te verwijderen. De oordopjes kunnen schoongeveegd worden met een vochtige doekje of antibacteriële reinigingsdoekjes.

Als u het filter uit het oordopje verwijdert (zie "Wisselen formaat oordopje") kan het oordopje ook worden gereinigd met zeep of hygiëne tabletten. Spoel het oordopje hierna af met lauwwarm water en maak het grondig droog.

Wij raden aan om alleen bij ernstige vervuiling het filter te reinigen met zeep of hygiëne tabletten. Na het reinigen dient het filter grondig te worden schoongespoeld met lauwwarm water en de kans krijgen om langzaam te drogen.

Opbergen

Bewaar de gehoorbescherming altijd in een schoon bewaarsysteem. Bewaar geen andere voorwerpen bij de gehoorbescherming.

Waarschuwingen

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient in luidruchtige situaties altijd geschikte gehoorbescherming gedragen te worden.
- De gehoorbescherming dient te worden ingebracht, aangepast en onderhouden overeenkomstig met de instructies. Regelmatig reinigen van het product en voldoende aandacht schenken aan onderhoud zorgen voor langdurige en optimale prestaties.
- Voor de gehoorbescherming in het oorkanaal wordt gebracht dient altijd gecontroleerd te worden of het filter correct in het oordopje is geplaatst.
- Om het gespecificeerde dempingsniveau te bereiken dient het oorkanaal volledig afgesloten te worden door het oordopje.
- De onderdelen van de gehoorbescherming kunnen beschadigd raken als ze in contact komen met een scherp voorwerp.
- Controleer de oordopjes regelmatig op scheurtjes of andere beschadigingen. Deze zullen een negatief effect hebben op de demping. Vervang indien nodig.
- De gehoorbescherming kan aangetast worden wanneer deze in contact komt met chemicaliën of alcohol.
- Houd de gehoorbescherming buiten het bereik van kleine kinderen.

Garantie

- Dit product wordt gedekt door een twee (2) jaar beperkte fabrieksgarantie.

Dit is een handleiding van [Ravesafe.nl](https://www.ravesafe.nl)